

AED (Laerdal) 使用法



AEDが到着しだいケースからAED本体を出
すか、ケースを開けます。



ただちにAEDの電源(緑色ボタン)を入れ、そ
の後は、音声メッセージに従ってください。



傷病者の衣服を取り除き、胸部を裸にします。胸部に何も無い事(胸毛・ネックレス・ペースメーカー・濡れている等)を確認し、電極パッドの袋を開封し、電極パッドのシールをはがし、粘着面を傷病者の胸部にしっかりと貼り付けます。(電極パッドを張り付ける位置は、電極パッドが入っていた袋に絵で示されています。)



電極パッドを貼り付けた後、パッドのコネクターを、AED本体の差込み口(点滅している)に入れます。



パッドのコネクターを差し込むと「傷病者から離れるように」との音声メッセージが流れ、自動的に心電図の解析が始まります。傷病者から離れるようにとの音声メッセージが流れたら「みんな、離れて！」と注意を促し、誰も傷病者に触れていないことを確認します。



AEDが除細動を加える必要があると判断すると、「除細動が必要です。」と音声メッセージが流れ、自動的に充電が始まります。充電には数秒かかります。充電が完了すると、「除細動ボタン(ショックボタン:オレンジボタン)を押してください。」との音声メッセージが流れ、電気ショックを実施することができます。除細動を加えた後はAEDを付けたままで、すぐに胸骨圧迫を行い心肺蘇生を再開します。

除細動後は、AEDから「直ちに胸骨圧迫を開始して下さい」等の音声メッセージが流れます。心肺蘇生再開後は、AEDの音声メッセージに従って実施して下さい。



※AEDの電極パッドは、救急隊に引き継ぐまで、傷病者の胸からはがさず、電源も入れたままにして下さい。