

AED (Medtronic) 使用 法 Life Pak 500T




AEDが到着しだいケースからAED本体の、ふたを開けます。



ただちにAEDの電源(緑色ボタン)を入れ、その後は、音声メッセージと本体の点滅ランプに従ってください。



傷病者の衣服を取り除き、胸部を裸にします。電極パッドの袋を開封し、電極パッドのシールをはがし、粘着面を傷病者の胸部にしっかりと貼り付けます。(電極パッドを張り付ける位置は、電極パッドが入っていた袋に絵で示されています。)
胸部に何も無い事を確認してください。(胸毛・ネックレス・ペースメーカー・濡れている等)

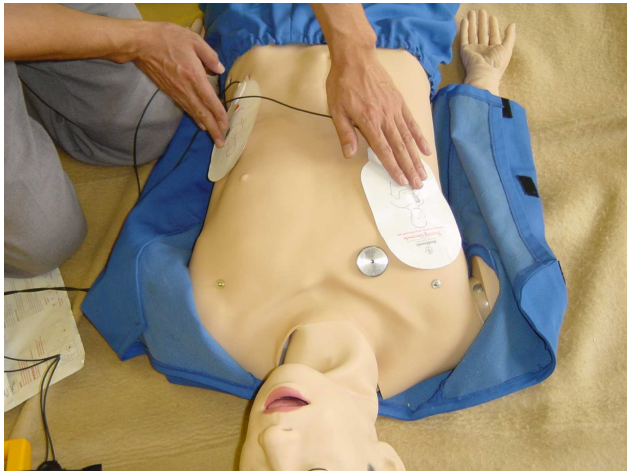

電極パッドを貼り付けた後、パッドのコネクターをAED本体の差込み口に入れます。



パッドのコネクターを挿入後、「解析ボタン(黄色ボタン)を押してください。」と音声メッセージが流れたら、「みんな、離れて！」と注意を促し、誰も傷病者に触れていないことを確認後、解析ボタンを押します。



解析後、充電中メッセージと除細動メッセージが流れますので再度傷病者、周囲の確認をします。



AEDが除細動を加える必要があると判断すると、「除細動が必要です。」と音声メッセージが流れ、自動的に充電が始まります。充電には数秒かかります。充電が完了すると、「通電ボタン(ショックボタン: 赤色ボタン)を押してください。」との音声メッセージが流れ、電気ショックを実施することができます。除細動を加えた後はAEDを付けたままで、すぐに胸骨圧迫を行い心肺蘇生を再開します。除細動後は、AEDから「直ちに胸骨圧迫を再開してください」等の音声メッセージが流れます。心肺蘇生再開後は、AEDの音声メッセージに従って実施して下さい。



※AEDの電極パッドは、救急隊に引き継ぐまで、傷病者の胸からはがさず、電源も入れたままにして下さい。