


## AED（日本光電）使用法 Cardio life AED




AEDが到着しだいAED本体のふたを開けます。

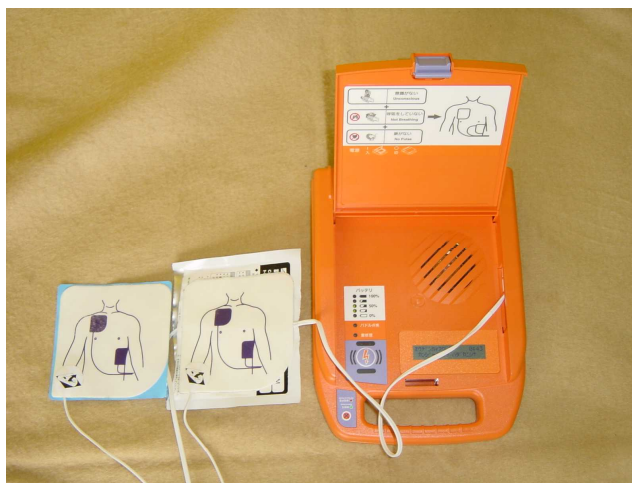

ふたを開けると、電源が自動的に入りますので、音声メッセージに従ってください。



傷病者の衣服を取り除き、胸部を裸にします。胸部に何も無い事(胸毛・ネックレス・ペースメーカー・濡れている等)を確認した後、電極パッドの袋を開封し、電極パッドのシールをはがし、粘着面を傷病者の胸部にしっかりと貼り付けます。(電極パッドを張り付ける位置は、電極パッドが入っていた袋に絵で示されています。)

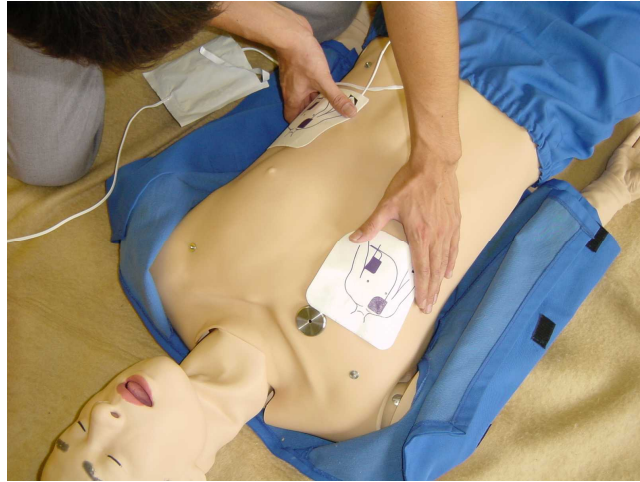

電極パッドを貼り付けると「傷病者にふれないでください!」との音声メッセージが流れ、自動的に心電図の解析が始まります。傷病者から離れるようにとの音声メッセージが流れたら「みんな、離れて!」と注意を促し、誰も傷病者に触れていないことを確認します。



AEDが除細動を加える必要があると判断すると、「除細動適応です。」と音声メッセージが流れ、自動的に充電が始まります。充電には数秒かかります。充電が完了すると、「点滅ボタン(ショックボタン:オレンジボタン)を押してください。」との音声メッセージが流れ、電気ショックを実施することができます。除細動を加えた後はAEDを付けたままで、すぐに胸骨圧迫を行い心肺蘇生を再開します。除細動後は、AEDから「直ちに胸骨圧迫を開始してください」等の音声メッセージが流れます。心肺蘇生再開後はAEDの音声メッセージに従って実施して下さい。



※AEDの電極パッドは、救急隊に引き継ぐまで、傷病者の胸からはがさず、電源も入れたままにしてください。